

NOTA INFORMATIVA

GEL ECO & IPL

Codice 5283



Dispositivo Medico in Classe I
ai sensi della Regola 1 dell'Allegato VIII del Regolamento (UE) 745/2017

DESTINAZIONE D'USO

I prodotti devono essere utilizzati da personale sanitario qualificato. GEL ECO & IPL è un prodotto di alta qualità con eccellenti caratteristiche di trasmissione degli ultrasuoni e scorrevolezza della sonda, che si mantengono costanti per lungo tempo. Il gel incolore GEL ECO & IPL è indicato anche per applicazioni IPL. GEL ECO & IPL non ossida, non contiene sostanze grasse, non lascia residui permanenti sulle sonde ed è facilmente asportabile. Contiene come battericida Euxyl® K 100 i cui componenti attivi sono Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Conforme alla norma sulla biocompatibilità ISO 10993-1. Non contiene formaldeide. Non danneggia la sonda dell'apparecchio per ecografia.

COMPOSIZIONE

Carbomer, TriEtanol Amin, MonoPropylene Glycol, Glycerin, Aloe Vera, EUXYL K 100, Deionized water.

ISTRUZIONI D'USO

- Persone sensibili a MCI/MI devono indossare guanti protettivi durante l'uso del prodotto.
- Applicare il GEL ECO & IPL nella quantità desiderata.
- Collegare e utilizzare le apparecchiature e le sonde secondo le istruzioni d'uso fornite dal loro produttore.
- Dopo la procedura rimuovere i residui del gel utilizzando carta, TNT o cotone inumidito in acqua.
- Per applicazioni IPL stendere uno strato uniforme di gel, secondo le istruzioni fornite con il macchinario per IPL.

GARANZIA E LIMITAZIONI

Conforme alla vigente normativa Europea sui Dispositivi Medici. Realizzato secondo le procedure del Sistema di Qualità certificato ISO 13485. Non potrà essere imputata alcuna responsabilità al Fabbricante, che non sarà tenuto a risarcire spese mediche o danni diretti o indiretti, derivanti dal mancato funzionamento o anomalie dei dispositivi di cui sopra, qualora siano utilizzati diversamente da come previsto dalle presenti istruzioni d'uso. Si raccomanda di informare tempestivamente il Fabbricante per qualunque malfunzionamento o difetto, di cui si venisse a conoscenza, relativamente a questo dispositivo.

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

- Occhi: in caso di contatto accidentale con gli occhi, sciacquare con abbondante quantità di acqua per 15 minuti. Se l'irritazione persiste, consultare un medico.
- Pelle: se la pelle diventa irritata lavare accuratamente con acqua. Se l'irritazione persiste consultare un medico.
- Ingestione: di norma l'ingestione accidentale non comporta rischi, ma qualora insorgessero complicazioni consultare un medico.

SMALTIMENTO

I rifiuti provenienti da strutture sanitarie devono essere smaltiti secondo le vigenti normative. Il gel è solubile in acqua e non costituisce una fonte di inquinamento per l'ambiente. Il contenitore può essere avviato allo smaltimento differenziato.



SCARICA DICHIARAZIONE E SCHEDA TECNICA
Consultabile nel sito www.golmar.com

AVVERTENZE: Solo per uso esterno. Non usare per registrazioni elettrocardiografiche. Il prodotto è fornito non sterile. Il prodotto è monouso – non riusare. Il suo riutilizzo può comportare: alterazioni dei materiali; la perdita delle caratteristiche funzionali iniziali del prodotto. Non applicare il gel sugli occhi o su cute che presenti irritazioni, abrasioni o ferite. Il prodotto può causare irritazione o arrossamenti della pelle, specialmente in persone allergiche o sensibili. Non ingerire. In applicazioni IPL le caratteristiche del gel possono deteriorarsi con l'uso: non riutilizzare su altre parti del corpo il gel già utilizzato. Richiudere la confezione dopo l'uso. Non usare il gel dopo la data di scadenza riportata sul flacone.

GOLMAR®

FR Rev1_06/2021
PRODOTTO ED IMPORTATO DA PAESI EXTRA-UE

GOLMAR Italia SpA - Corso Unione Sovietica, 603 - 10135 - Torino - Tel. +39 011 3583310 - www.golmar.com - info@golmar.com

