

PROTEZIONE DELLA PERSONA

SEMIMASCHERA FILTRANTE FFP2 NR MOD. AB03



CE 2008

DPI Certificato/PPE certified by: DOLOMITICERT S.C.A.R.L.
Z.I. Villanova 32013 - Longarone (BL) - Italia
Notified Body number: 2008

Dispositivo di Protezione Individuale di Categoria III ai sensi del Regolamento (UE) 425/2016.
STANDARD NORMATIVI EN 149:2001+A1:2009.

Marcatura CE garantisce il soddisfacimento dei requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dal Regolamento (UE) 425/2016 in relazione ai dispositivi di protezione individuale.



SCARICA DICHIARAZIONE UE

Consultabile nel sito www.golmar.com

CARATTERISTICHE

Livello di protezione FFP2 NR, filtrazione a strati per isolare dall'inquinamento atmosferico, altamente resistente alla polvere. Spazio traspirante 3D per una respirazione confortevole. Tessuto Non Tessuto antibatterico che non irrita la pelle. A prova di umidità non lascia segni sul viso. Di forma convessa, ha una barretta deformabile stringinaso che permette un adeguamento anatomico confortevole e previene l'appannamento. Elastico per il fissaggio alle orecchie. Si adatta ad un'ampia gamma di tipologie di viso. Colore bianco.

DESTINAZIONE D'USO

Indicata per la protezione delle vie respiratorie particelle solide e liquide (AirDroplets). Generalmente usata sia contro l'inquinamento atmosferico da polveri sia nell'industria alimentare, estrattiva e farmaceutica. Non sterile. Non adatto contro gas e vapori nocivi. Non adatto in ambienti poco ossigenati, sott'acqua o in operazioni antincendio. Da cambiare immediatamente se danneggiata o se si dovesse riscontrare difficoltà respiratoria.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

Conservare e trasportare le semimaschere non ancora utilizzate all'interno della propria confezione in luogo asciutto a temperatura compresa tra -30°C e +40°C. Non utilizzare oltre la data di scadenza indicata sulla confezione. La bardatura del capo ha la medesima data di fabbricazione e di scadenza del dispositivo completo. Non disperdere il dispositivo nell'ambiente dopo l'uso. Smaltire in conformità alle norme di legge locali di gestione dei rifiuti.

AVVERTENZA

Prima dell'uso, controllare il dispositivo in ogni sua parte in modo da verificare la presenza di fori, strappi o eventuali lesioni. In presenza di eventuali danneggiamenti. **NON UTILIZZARE** e prenderne uno nuovo. Sostituire la maschera immediatamente se si avverte difficoltà respiratoria o se la maschera subisce danni, o se sussistono problemi di aderenza al viso. La barba può ridurre l'efficienza della maschera. Non utilizzare quando le concentrazioni dei contaminanti sono pericolose per la salute o la vita o in carenza di ossigeno. Non utilizzare in atmosfera dove c'è pericolo di esplosione. Non richiede manutenzione. Conservare la confezione per garantire la rintracciabilità ed ulteriori informazioni.


 [NR] Non riutilizzabile




Distribuito da: GOLMAR ITALIA SPA - Corso Unione Sovietica, 603 - 10135 TORINO - Tel. 0113583310 - www.golmar.com



FFP2 NR mod. AB03

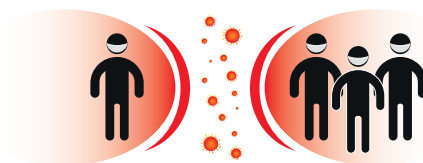

COME INDOSSARE LA MASCHERA

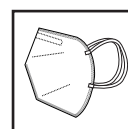

Aprire la semimaschera e modellare il nasello metallico con le dita.



Posizionate la maschera sul viso con il nasello rivolto verso l'alto in modo da coprire naso e bocca e posizionate gli elastici dietro le orecchie.



Modellate il nasello con entrambe le mani in modo che il dispositivo di protezione aderisca al viso.



Posizionate le mani davanti al dispositivo, espirate energicamente e verificate che il dispositivo si rigonfi leggermente. Qualora ci sia un passaggio d'aria tra il viso ed il dispositivo, ripetete le operazioni di posizionamento. Non utilizzare prima di aver ottenuto una buona aderenza al viso.

Semimaschera monouso: la semimaschera filtrante antipolvere non deve essere utilizzata per più di un turno di lavoro (8 ore).

Confezione da 10 bustine contenenti ciascuna 2 pezzi

Codice 2218

Golmar si riserva il diritto di apportare cambiamenti e/o miglioramenti ai prodotti senza preavviso e in qualsiasi momento. Le informazioni ivi contenute sono destinate a Personale ed Addetti all'Igiene Professionale e si basano sulle nostre conoscenze attuali. Il prodotto deve essere utilizzato per le funzioni specifiche indicate, non si risponde di conseguenze derivanti da uso improprio o non conforme alle indicazioni riportate in etichetta.

www.golmar.com
CXT_Rev.01_112021

TORINO - Show Room
BORGARETTO (TO)
PERO (MI)
ROVATO (BS)

Tel. +(39) 011.346722
Tel. +(39) 011.3583310
Tel. +(39) 02.38103456
Tel. +(39) 030.7722662

SIMAXIS (OR)
GENOVA
OSPEDALETTO (PI)
BALERNA (CH-Svizzera)

Tel. +(39) 0783.405586
Tel. +(39) 010.7450004
Tel. +(39) 050.983248
Tel. +(41) 91.6461177

GOLMAR
IGIENE PROFESSIONALE

LIMENA (PD)
POMEZIA (Roma)
CATANIA
PALERMO

Tel. +(39) 049.768766
Tel. +(39) 06.91602060
Tel. +(39) 095.304304
Tel. +(39) 091.6791568

CAMERANO (AN)
CITTÀ SANT'ANGELO (PE)
MANFREDONIA (FG)

Tel. +(39) 071.732242
Tel. +(39) 085.959765
Tel. +(39) 0884.541464